

Nourisil™ MD

Zaawansowane leczenie blizn

Wyrób medyczny

NOWOŚĆ




Blizny są niepożądanym, choć normalnym i nieuniknionym efektem gojenia ran. Kiedy dochodzi do uszkodzenia skóry, jej bariera zostaje naruszona i warstwa rogowa nie jest już dłużej w stanie utrzymywać właściwego poziomu nawilżenia. Silikonowe opatrunki obniżają utratę wody w skórze i zwiększają nawilżenie warstwy rogowej.


Nourisil™ MD to bardzo lekki, przezroczysty, silikonowy żel samowysychający, który został opracowany w celu przyspieszenia redukcji nowych i starych bliznowców i blizn przerostowych, będących pozostałością po:

- zabiegach chirurgicznych,
- ranach,
- urazach
- oparzeniach, oraz zapobiegania ich powstawaniu.


Zmniejsza przebarwienia

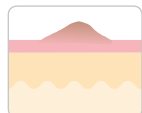

Łagodzi

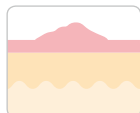

Splaszcza

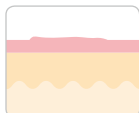

Ilustracje służą jedynie jako materiał poglądowy.

Żel Nourisil™ MD:

- zawiera unikalny zestaw pięciu silikonów,
- witaminę E,
- zapewnia utrzymanie wilgotności skóry.
- spłaszczyc, zmiękczyć i wygładzić blizny,
- łagodzi wywołane przez nie swędzenie i dyskomfort skóry,
- zmniejsza związane z nimi ból i zaczerwienienie.
- nadaje skórze uczucie komfortu
- nie jest tłusty.

Żel Nourisil™ MD jest przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry, w tym do skóry wrażliwej, może być stosowany również u dzieci.

Można go łatwo nanosić na blizny na każdym obszarze skóry, w tym na twarz i w okolicy stawów. Stosowany zgodnie z zaleceniami, żel Nourisil™ MD wysycha, tworząc warstwę o działaniu nawilżającym i ochronnym.



Charakterystyka farmaceutyczna:

Nourisil™ MD bardzo lekki, przezroczysty, silikonowy żel samowysychający.

Uwaga!

- Żelu Nourisil™ MD nie należy stosować na otwarte rany lub na oparzenia trzeciego stopnia.
- Nie należy stosować w przypadku schorzeń dermatologicznych, które naruszają integralność skóry. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z błonami śluzowymi oraz oczami.
- W przypadku stosowania innego preparatu nanoszonego miejscowo na ten sam obszar skóry należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Tylko do użytku zewnętrznego.



Jak stosować żel Nourisil™ MD:

- Umyć ręce przed i po użyciu.
- Upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.
- Zdjąć zatyczkę z dozownika. Nacisnąć kilkakrotnie pompkę, by pojawił się żel.
- Delikatnie wmasować niewielką ilość Nourisil™ MD w bliznę i zostawić do wyschnięcia. Jeśli będzie to konieczne, ostrożnie wytrzeć nadmiar wyrobu za pomocą chusteczki, by uniknąć zabrudzenia ubrania.
- Po wyschnięciu obszar posmarowany żelem Nourisil™ MD można pokryć kremem do opalania lub kosmetykami.
- Aplikować Nourisil™ MD dwa razy na dobę; raz rano i raz wieczorem.
- Zalecany czas trwania leczenia wynosi 60-90 dni. W przypadku większych lub starszych blizn konieczne może być dłuższe leczenie.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze od 4 do 25°C.
- Nie używać żelu Nourisil™ MD po upływie 12 miesięcy od otwarcia lub po upływie wskazanego na opakowaniu/etykiecie terminu ważności (EXP).

Jakość:

- Nourisil™ MD jest produkowany zgodnie z najwyższymi standardami farmaceutycznymi, w ośrodku posiadającym certyfikat ISO 13485 oraz stosującym GMP [dobre praktyki produkcyjne].
- Nourisil™ MD jest dostępny w higienicznym i wygodnym, gotowym do użycia 30 g systemie dozowania bez napowietrzania

Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj swojego lekarza, farmaceutę lub odwiedź stronę

fagron.pl



fagron.pl

Fagron sp. z o.o. ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków
tel.: +48 12 3343 512, fax: +48 12 3343 513

Aplikacja *Fagron Receptura* na tablety i smartfony
dla lekarzy i farmaceutów przybliżająca i prezentująca
przepisy recepturowe - więcej na fagron.pl

